



ハイドロマーク

HydroMARK™

乳房用病変識別マーカー

ハイドロマークはハイドロゲル製プラグと
チタン製マーカーの組み合わせにより
X線、超音波、MRI下で高い視認性を実現します。



ハイドロマーク留置の メリット

超音波下での
優れた視認性

症例に合わせた
マーカーの
バリエーション



手術時、治療時、
経過観察時の目印

視認性

超音波下で高い視認性を有するハイドロゲルを採用

ハイドロゲル製プラグは体内留置後、膨潤し超音波下で低超音波像
として描出され、時間の経過と共に体内に吸収されます。


超音波

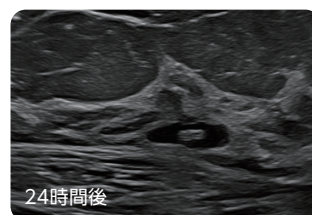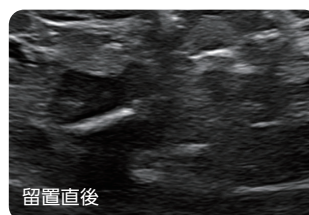


X線およびMRI下でも視認が可能

マーカーは純チタン製、生体適合性に優れています。

X線

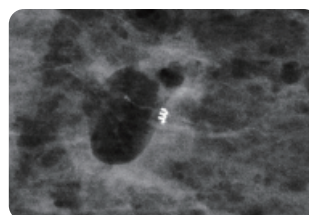

MRI

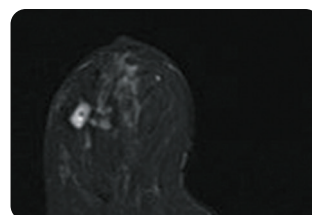

*それぞれの画像の倍率は異なります。画像は本品の見え方の一例であり、
臨床における視認性と比較する目的ではありません。

Mammotome

バリエーションのある マーカー形状


臨床的ニーズに応じて
3タイプからお選びいただけます。



パレル



オープンコイル

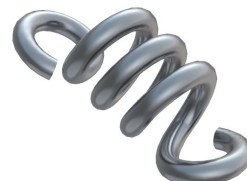

バタフライ

マンモトーム生検機器別の形状


マンモトーム リボルブ用(ハイドロマーク・フレキシブル・ロング)



マンモトーム リボルブ用(ハイドロマーク・リジッド)



マンモトーム用(ハイドロマーク・フレキシブル)

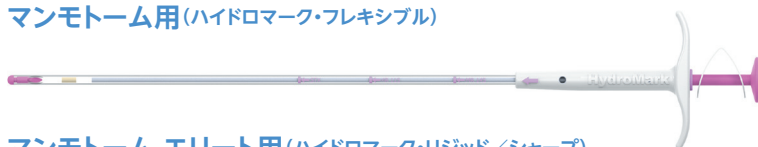

マンモトーム エリート用(ハイドロマーク・リジッド／シャープ)



*製品の実際の寸法/寸法比ではありません。

製品リスト

品番	製品名	包装単位	組み合わせ可能機器
4010-01-08-T1	ハイドロマーク・フレキシブル(8G パレル)	10入	販 売 名：ハンディマンモトーム プローブ (認証番号:21300BZY00186000) マンモトーム EX (認証番号:224AABZX00113000) 一般的名称：吸引式組織生検用針キット クラス分類：[2]管理医療機器
4010-01-08-T3	ハイドロマーク・フレキシブル(8G オープンコイル)	10入	
4010-01-08-T4	ハイドロマーク・フレキシブル(8G バタフライ)	10入	
4010-01-11-T1	ハイドロマーク・フレキシブル(11G パレル)	10入	
4010-01-11-T3	ハイドロマーク・フレキシブル(11G オープンコイル)	10入	販 売 名：マンモトーム エリート (認証番号:225AABZX00037000) 一般的名称：吸引式組織生検用針キット クラス分類：[2]管理医療機器
4010-01-11-T4	ハイドロマーク・フレキシブル(11G バタフライ)	10入	
4010-02-15-T1	ハイドロマーク・リジッド／シャープ(15G パレル)	10入	
4010-02-15-T3	ハイドロマーク・リジッド／シャープ(15G オープンコイル)	10入	販 売 名：マンモトーム リボルブ (認証番号:226AABZX00092000) マンモトーム リボルブ US (認証番号:226AABZX00187000) 一般的名称：吸引式組織生検用針キット クラス分類：[2]管理医療機器
4010-02-15-T4	ハイドロマーク・リジッド／シャープ(15G バタフライ)	10入	
4010-03-09-T1	ハイドロマーク・リジッド(10G パレル)	10入	
4010-03-09-T3	ハイドロマーク・リジッド(10G オープンコイル)	10入	
4010-05-10-T1	ハイドロマーク・フレキシブル・ロング(10G パレル)	10入	
4010-05-10-T3	ハイドロマーク・フレキシブル・ロング(10G オープンコイル)	10入	
4010-05-10-T4	ハイドロマーク・フレキシブル・ロング(10G バタフライ)	10入	

●事前に必ず本製品の使用目的、禁忌・禁止・警告並びに使用上の注意を添付文書*でご確認頂き、使用方法を順守してください。

*独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページでも閲覧可能です。

●製品は改良等のため予告なく形状・仕様が変更する事があります旨、あらかじめご了承ください。

製造販売元／お問い合わせ先

デヴィコア メディカル ジャパン株式会社

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目29番9号 東亜DKK株式会社別館オフィスビル7階
TEL:03-6205-6951 FAX:03-6205-6952 www.devicomedicaljapan.jp

クラス分類:[4]高度管理医療機器
一般的名称:植込み型病変識別マーカ
承認番号:22900BZX00070000

DMJ017C